

A vertical red bar on the left side of the page, featuring a white floral and leaf pattern.

Eleganza 3XC

Pat pentru A.T.I.



Eleganza 3XC – sistem complet pentru A.T.I.

Design-ul și funcționarea patului Eleganza 3XC sunt individualizate pentru a îndeplini cerințele îngrijirii intensive. Acest pat modern construit pe o coloană de susținere oferă un program integrat care ajută personalul medical să salveze viața pacienților critici.



ELEGANZA
3XC



OBIECTIV: SISTEM PENTRU PLĂMÂNI ȘI INIMĂ

Patul Eleganza 3XC susține ventilația naturală a plămânilor și ameliorează funcționarea inimii datorită reglării în poziția Scaun pentru cardiaci. Pneumonia nozocomială și atelectaza pot fi detectate la timp datorită examinării radiologice sofisticate a plămânilor, efectuată pe pat. Compatibilitatea brațului C al patului Eleganza 3XC permite efectuarea intervențiilor chirurgicale cardiologice de bază.

OBIECTIV: PREVENIREA CĂDERII

Conceptul revoluționar al panoului lateral optimizează prevenirea căderii din pat a pacientului, în funcție de riscurile și starea acestuia.

OBIECTIV: PREVENIREA ESCARELOR DE DECUBIT

Sistemul unic Ergoframe® reduce presiunea aplicată pe țesutul din regiunea pelviană în timpul poziționării și reduce frecarea dintre pielea de pe spatul pacientului și saltea. Construcția panoului lateral (înălțimea) permite folosirea majorității saltelelor terapeutice.

OBIECTIV: RECUPERARE

Consecințele negative ale sindromului imobilizării pot fi eliminate prin mobilizarea activă a pacientului folosind dispozitive ajutătoare pentru mobilizare. Pacientul poate fi mobilizat cu grijă și în siguranță. În plus, sistemul de mobilizare ușurează mult munca asistentelor și a personalului de îngrijire.

OBIECTIV: CONTROLUL INFECȚIILOR

Suprafața patului poate fi decontaminată foarte ușor datorită design-ului cu coloană, datorită construcției drepte, fără îmbinări și datorită compatibilității cu dispozitivele de curățat cu aburi.

OBIECTIV: SPRIJINIREA PERSONALULUI

Numeroase caracteristici ale patului ușurează munca îngrijitorilor, a tehnicienilor și a celorlalți membri ai personalului de îngrijire.

Obiectiv: Plămâni și inimă

Susținerea funcțiilor vitale ale pacienților critici este o prioritate maximă în unitățile de terapie intensivă. Datorită setului de funcții unice ale patului Eleganza 3XC, personalul medical poate controla și monitoriza mai ușor și mai frecvent starea a două organe cu importanță vitală – inima și plămânii. Poziționat într-o poziție specială, patul poate susține respirația și activitatea cardiacă.

POZIȚIA SCAUN CARDIAC

Poziționarea patului ca scaun cardiac ajută la ventilarea naturală a plămânilor.

- Personalul poate regla foarte ușor patul în poziția scaun cardiac atingând ușor o tastă de pe panoul de control. Capacitatea vitală a plămânilor crește, iar ventilarea plămânilor se îmbunătățește în poziția șezând.
- Sistemul cinematic Ergoframe® extinde platforma saltei în regiunea pelviană. Se reduce astfel comprimarea plămânilor atunci când un pacient este poziționat pe patul în poziția de scaun cardiac.
- Această reglare a patului este și foarte confortabilă pentru pacient. El nu trebuie să se dea jos din pat pentru a efectua activități obișnuite, de exemplu, pentru a lua masa.



COMPATIBILITATE CU BRAȚUL C

Patul Eleganza 3XC permite efectuarea anumitor intervenții chirurgicale cardiologice asistate de brațul C, cu pacientul așezat pe pat. Printre proceduri se numără introducerea dispozitivului de stimulare intracardiacă, a cateterelor în artera pulmonară pentru măsurarea parametrilor hemodinamici, a balonului intraaortic (susținere mecanică a inimii) sau controlarea poziției cateterelor sau a stimulării prin electrozi.

Tratamentele chirurgicale cardiace asistate prin brațul C sunt permise datorită platformei radiotransparente pentru saltea (din regiunea pelviană până la cap). Accesul brațului C este liber datorită construcției cu coloană dublă.





EXAMINARE RADIOLOGICĂ PE PAT

Examinarea radiologică pe pat a unui pacient critic este o activitate obișnuită în secțiile de terapie intensivă. Monitorizarea radiologică regulată a plămânilor și a toracelui poate preveni complicațiile care pot pune în pericol viața pacientului, cum ar fi pneumonia severă sau atelectaza.

Datorită funcțiilor speciale ale patului Eleganza 3XC, personalul poate diagnostica pacientul așezat pe pat cu ajutorul unui dispozitiv mobil de radiografiere încorporat în pat. Prin urmare, starea pacientului nu este pusă în pericol prin mutarea din pat pe mesele speciale de radiografiere. Pacientul nu trebuie ridicat pentru a-i poziționa sub spate caseta radiologică. Spătarul patului Eleganza 3XC este radiotransparent și sub el este fixat un suport pentru caseta radiologică. Construcția glisantă a suportului permite introducerea ușoară a casetei sub platforma saltelei, din lateralul patului.



BENEFICIILE INTRODUCERII LATERALE A CASETEI RADIOLOGICE

- Acces liber pentru introducerea casetei radiologice
- Posibilitatea de a poziționa exact caseta radiologică

ACCES LIBER LA TORACELE PACIENTULUI

Pentru a introduce cateterele venoase centrale personalul medical are nevoie de acces liber și sigur la toracele pacientului. Acest lucru este posibil datorită panourilor laterale. Secțiunea dinspre cap a panoului lateral permite coborârea rapidă a panoului și accesul liber la pacient, în timp ce secțiunea centrală îl protejează pe acesta împotriva căderii.

Tetiera fixă a patului este de mare ajutor pentru procedurile de traheotomie sau alte proceduri efectuate asupra jumătății superioare a corpului pacientului. Dacă platforma saltelei este fixată la cea mai mare înălțime posibilă, marginea superioară a tetierei îi permite asistentei să-și sprijine brațul în mod confortabil și natural.



Obiectiv: Prevenirea căderii

Sistemul unic de panouri laterale conferă patului Eleganza 3XC multă siguranță. Panourile laterale permit personalului medical să aleagă setarea corespunzătoare stării medicale a fiecărui pacient în parte.

PROTECȚIE INDIVIDUALĂ

Sistemul de panouri laterale al patului Eleganza 3XC este alcătuit din trei secțiuni – panoul lateral de la capul pacientului, panoul lateral central și panoul lateral opțional Eleganza Protector® de la capătul patului. Astfel, personalul poate folosi componentele sistemului în funcție de rata riscului ca pacientul să cadă din pat.

Dacă pacientul prezintă un risc crescut de a cădea din pat, asistenta poate ridica panoul lateral pe întreaga lungime a platformei saltelei. Într-un astfel de caz, patul poate fi prevăzut cu panoul Eleganza Protector® folosit pentru a nu le permite pacienților în stare confuză să se dea jos din pat.



Panoul Eleganza Protector® oferă o barieră suplimentară împrejurul platformei saltelei. El împiedică căderea pacienților din pat, mai ales a celor în stare confuză sau cu un risc crescut de a cădea din pat.

LINET READY

Panourile patului Eleganza 3XC îndeplinesc pe deplin cele mai recente cerințe privind siguranța pacientului. Standardele propuse înăspresc cerințele pentru reducerea la minim a riscurilor de apariție a unor situații periculoase cum ar fi ca pacientul să-și înțepenească capul, gâtul sau unul dintre membre între panourile patului.



Panourile laterale fără Eleganza Protector® reprezintă nivelul standard de protecție pentru majoritatea pacienților.



Accesul liber la pacient pentru acordarea de îngrijire și efectuarea de proceduri în zona abdominală, pelviană sau a toracelui este asigurat prin coborârea secțiunii centrale a panourilor laterale



ELEGANZA
3XC

DETALII IMPORTANTE



Mecanismul rabatabil permite reglarea panourilor laterale rapid și ușor, indiferent dacă sunt ridicate sau coborâte.




Panourile laterale pot fi prevăzute cu un dispozitiv integrat de control la care au acces pacientul întins pe pat și personalul de îngrijire.



Panourile laterale oferă protecție indiferent de pozițiile platformei saltei.

7 ZONE DE SIGURANȚĂ

Ca răspuns la incidența crescută a accidentărilor asociate cu construcția patului au fost definite 7 zone precum și dimensiunile lor, inclusiv procedurile de manevrare a patului pentru a reduce riscurile de prindere a membrilor pacientului.

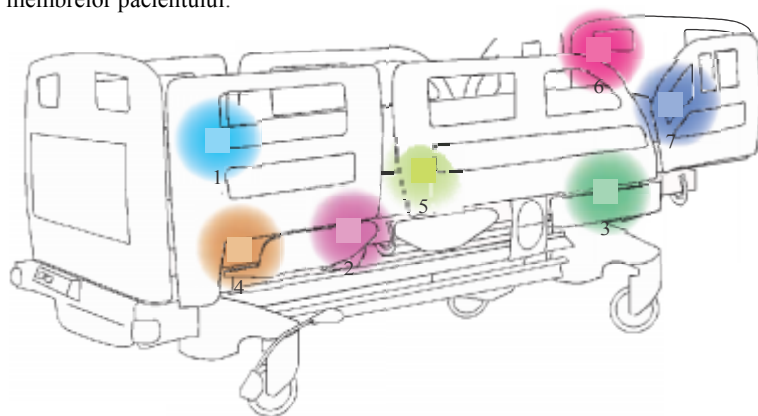

		Eleganza 3XC
spațiu gol înăuntrul panoului lateral	1	✓
spațiu gol sub panoul lateral, între elementele de susținere	2	✓
spațiu gol între panoul lateral și saltea	3	✓
spațiu gol sub panoul lateral, la capătul acestuia	4	✓
spațiu gol între panourile laterale sectionate	5	✓
spațiu gol între panoul lateral și tăblia de la capătul/capul patului	6	✓
spațiu gol între saltea și tăblia de la capătul/capul patului	7	✓

Obiectiv: Escarele de decubit

LINET acordă o atenție deosebită problemei escarelor de decubit. Compania a dezvoltat un sistem integrat de caracteristici care implică nu numai funcționarea patului pentru prevenirea și tratamentul mai ușor al escarelor de decubit, dar oferă și o saltea activă proprie care respectă parametrii standard de mai sus, pentru a preveni escarele de decubit.

ERGOFRAME®

Platforma pentru saltea a patului Eleganza 3XC este prevăzută cu un sistem Ergoframe® care permite extinderea zonei pelviene și reduce presiunea asupra țesutului în această zonă a corpului.


În această zonă a corpului se dezvoltă până la 40% din escarele de decubit.

O altă cauză a dezvoltării escarelor de decubit este frecarea și tensiunea de la suprafața pielii. Sistemul Ergoframe® reduce și frecarea dintre saltea și pielea pacientului din zona spatelui și a omoplaților, reducând astfel riscul de formare a escarelor de decubit.

EFECTELE SISTEMULUI ERGOFRAME®

- menținerea unei bune ventilări a plămânilor;
- reducerea riscului de formare a escarelor de decubit în zona pelviană și a omoplaților;
- confortul pacientului în toate pozițiile, mai ales în poziția șezând;
- prevenirea complicațiilor care apar din cauza comprimării organelor interne din cavitatea abdominală;
- asigurarea sprijinirii constante a capului.

- *Pacientul își poate sprijini foarte confortabil capul pe saltea și nu trece peste marginea saltelei nici măcar atunci când spătarul e ridicat în cea mai înaltă poziție; și asta datorită faptului că spătarul este suficient de lung și este conectat la sistemul Ergoframe® prin cinematica spătarului.*

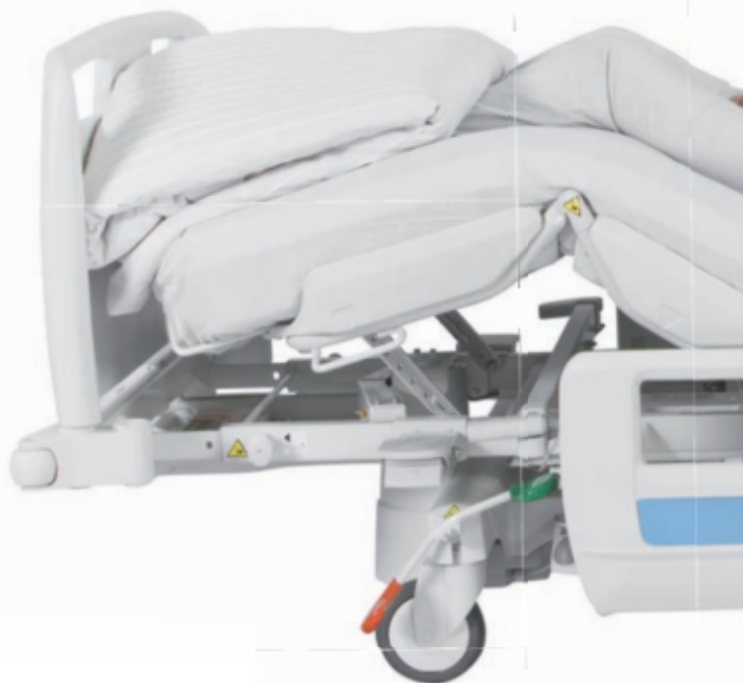

SALTEAUA ACTIVĂ VIRTUOSO



O armă importantă în lupta împotriva escarelor de decubit și a prevenirii lor este salteaua activă. Salteaua activă Virtuosu pe care a creat-o și o produce compania LINET este una dintre cele mai bune saltele care îndepărtează presiunea. Ea este proiectată pentru pacienții în stare critică și cei care stau întinși pe pat pentru o perioadă lungă de timp și permite prevenirea eficientă și tratamentul escarelor de decubit. Parametrii și funcționarea saltelei Virtuosu au fost selectați pe baza unei serii de studii clinice efectuate înainte de crearea produsului.

- Salteaua Virtuosu este proiectată pentru o platformă de saltea care are 4 secțiuni.

- Sistemul Ergoframe® crește spațiul din zona pelviană și cea abdominală. Astfel, se reduce presiunea asupra pielii și a organelor din toate zonele.



SALTEAUA PASIVĂ ERGOMAT

Gama de produse LINET cuprinde și saltele de înaltă calitate proiectate pentru pacienți cu risc mai scăzut de a dezvolta escare. Dimensiunea saltelei a fost gândită în așa fel încât ea să depășească marginea platformei saltelei și să-i ofere pacientului un confort plăcut atunci când se dă jos din pat sau când stă pe marginea patului. Interiorul saltelei este din spumă vâsco-elastică. Husa saltelei este elastică și poate fi spălată.

Datorită noului sistem de saltea cu trei celule, presiunea care apasă asupra pielii pacientului este îndepărtată total mai ales din zonele corpului cu cel mai mare risc. Ciclul de umplere cu aer a diferitelor zone ale saltelei se repetă o dată la 7.5 minute și funcționează 24 de ore. Intervalul de 7.5 minute corespunde mișcărilor naturale ale unei persoane care doarme și care își schimbă poziția de aproximativ opt ori într-o oră.

- Corpul saltelei are două straturi, fiecare având o structură diferită de celule. Acestea sunt conectate

la mai multe module. Astfel, salteaua oferă protecție optimă pacientului care nu se adâncește în sau printre celule.

- Salteaua Virtuoso oferă personalului de îngrijire trei moduri de operare: modul terapeutic, static și de evaluare. Astfel, rata de succes a tratamentului escarelor de decubit poate fi evaluată, apoi este aleasă cea mai bună procedură pentru următoarele 24 de ore. Panoul de pe compresorul cu design ergonomic care este ușor de manevrat acționează modurile de funcționare, precum și alte funcții.



Obiectiv: Recuperare

MOBILIZARE ACTIVĂ

Construcția patului Eleganza 3XC oferă un sistem complet de caracteristici care facilitează mobilizarea pacientului în modul cel mai sigur și eficient.

Caracteristicile de mobilizare ale patului îi ajută pe fizioterapeuți și asistente să reducă durata de timp alocat muncii cu pacienții.




SISTEMUL MOBI-LIFT®

Cârjele de susținere Mobi-Lift® integrate în platforma saltei patului îl ajută pe pacient pentru a se da jos sau a se urca în pat. Datorită acestor cârje de susținere Mobi-Lift® pacientul are o anumită siguranță și nu se mai teme că va cădea. Aceste cârje de susținere Mobi-Lift® au integrat un buton simplu de reglare a înălțimii patului. Pacientul care stă pe marginea patului poate folosi această funcție. Asistenta medicală sau fizioterapeutul de recuperare îl ajută pe pacient să se ridice, dar asistența lor trebuie redusă la minimum necesar pentru siguranță, datorită cârjelor de

susținere ale patului Eleganza 3XC. Aceste mânere Mobi-Lift® preiau o mare parte din munca lor fizică și îi mobilizează pe pacienți să devină activi în timpul mobilizării lor.



PROCEDURA DE MOBILIZARE

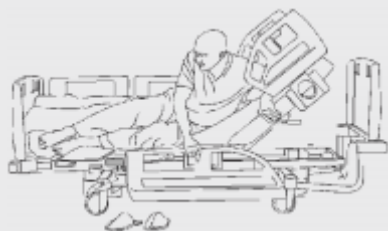

Pacientul se poate ridica din pat în siguranță pentru că se poate sprijini pe spătar și pe panoul lateral de la mijlocul patului.



Pacientul poate glisa ușor înspre exterior cârja Mobi-Lift® cu o singură mână.



Pentru a se da jos, pacientul poate regla singur înălțimea potrivită a patului cu ajutorul butonului de control integrat în cârja Mobi-Lift®.

Obiectiv: Sprijinirea personalului

Pat pentru A.T.I.

SISTEM ÎN SPRIJINUL PERSONALULUI MEDICAL

Patul Eleganza 3XC ușurează și eficientizează munca personalului medical din A.T.I. datorită caracteristicilor și proprietăților funcționale unice.



CÂNTAR ÎNCORPORAT ÎN PAT

Patul Eleganza3XC poate fi echipat cu un cântar încorporat care permite cântărirea pacientului fără a-l supune unui transfer riscant și necorespunzător. Sistemul de cântărire al patului Eleganza 3XC măsoară valorile absolute ale masei corporale a pacientului (neinfluențate de pat) și depistează orice modificare a masei corporale a acestuia, indiferent de poziția patului. O funcție utilă "îngheață" masa corporală a pacientului atunci când sunt adăugate sau luate obiecte de pe platforma patului, fără a afecta valoarea măsurată (schimbarea lenjeriei patului și a pijamalelor pacientului, schimbarea soluțiilor perfuzabile, adăugarea sau scoaterea unor accesorii).

Cântarul integrat poate stoca în memorie 10 valori absolute cântărite.



CONTROLUL INFECȚIILOR



Igienizarea și dezinfectarea perfectă a tuturor suprafețelor dintr-un salon și a patului reprezintă esența prevenirii eficiente a infecțiilor nosocomiale. Decontaminarea ușoară a patului Eleganza 3XC este garantată de construcția simplă și de utilizarea tehnologiei fără îmbinări.

Construcția patului pe coloană este esențială pentru igienizarea ușoară.

Coloanele sunt alcătuite din profile speciale din aluminiu fără îmbinări și fante care sunt greu de curățat. Construcția patului permite accesul liber la oricare dintre părțile sale. Panourile laterale, capul și capătul patului sunt părțile cele mai expuse ale patului pe care personalul de îngrijire și pacientul le ating de mai multe ori pe zi; prin urmare, patul este construit cu tehnologia fără îmbinări, reducând astfel riscul de transmitere a infecțiilor nosocomiale. .

A 5-a ROATĂ

A 5-a roată din partea centrală a cadrului patului ușurează efortul personalului medical atunci când îl manevrează în spații mici. Datorită celei de a 5-a roți, patul poate fi manevrat ușor în poziția dorită, fără a-l împinge și a-l trage de mai multe ori. Pe coridoarele lungi, a 5-a roată menține direcția dreaptă. Posibilitatea de a mișca drept patul în timpul transportării pacientului contribuie la reducerea efortului fizic depus de asistente.

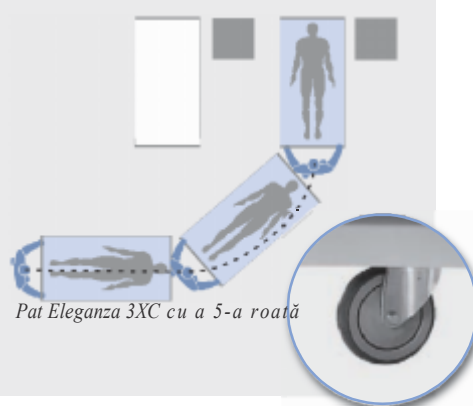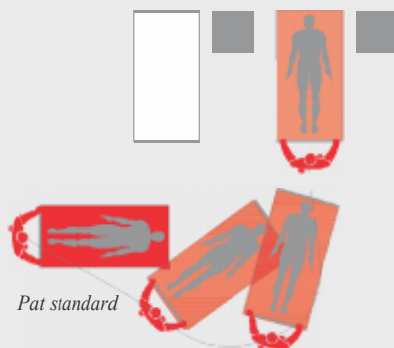

Configurație și parametri tehnici

DOTARE DE BAZĂ

Pat cu acționare electrică și construcție cu coloană

- Spătarul și secțiunea pelviană sunt radiotransparente
- Greutate maximă suportată: 230 kg
- Platformă pentru saltea din 4 secțiuni
- adaptată pentru examinarea cu brațul C din zona pelviană până în zona capului
- Panou lateral din plastic, secționat + taste de control
- Poziționare prin sistemul Ergoframe®
- Deblocare manuală a spătarului pentru CPR
- Tăblii detașabile din plastic la capetele patului cu posibilitate de blocare împotriva scoaterii accidentale
- Extensia și scurtarea suprafeței patului
- Panou de supraveghere, memorie cu 5 funcții
- Control de siguranță folosind butonul GO
- Auto-contur
- Baterie de rezervă cu încărcător și diagnosticarea duratei de funcționare
- Raft de lenjerie cu suport pt. panoul de supraveghere Tente
- Roți Tente, diametru de 150 mm, control roată centrală
- Amortizoare de colț
- Tăblii din plastic pentru cadrul patului
- Stativ pentru perfuzie
- Suport de transport pentru cablul de alimentare
- Suporturi pentru centura Segufix
- Suport saltea

CARACTERISTICI OPȚIONALE

- Cântar încorporat
- Suport casetă radiologică
- Eleganza Protector®
- Cârje Mobi-Lift®
- A 5-a roată
- Pedale de control
- Lumină de veghe
- Telecomandă pentru pacient
- Telecomandă pentru pacient cu tastatură iluminată

ELEGANZA
3XC

TĂBLII FIXE LA CAPETELE PATULUI

- Tăblia de la capul patului este detașabilă și are o înălțime fixă permițând astfel accesul rapid și ușor la capul, gâtul și toracele pacientului.

2 PANOURI LATERALE

Panourile laterale secționate îl protejează pe pacient împotriva căderilor din pat și îl ajută să se mobilizeze.

3 INTEGRAT

Panoul de control pentru cântarul integrat se află sub tăblia de la capătul patului este protejat de impacturi.



4 CÂRJE DE SPRIJIN MOBI-LIFT®

Datorită cârjelor de sprijin Mobi-Lift® pacientul poate fi mobilizat în siguranță și în mod mai eficient. Cârjele pot fi împinse ușor sub cadrul patului.

5 PLATFORMA ERGOFRAME® PENTRU SALTEA

Platforma Ergoframe® pentru saltea este esențială pentru poziționarea ergonomică a pacientului.

6 PANOU CENTRAL DE CONTROL PENTRU ASISTENTE

Panoul de supraveghere permite reglarea patului în orice poziție. El este prevăzut cu memorie în care sunt stocate pozițiile în care este fixat patul cel mai adesea, butonul GO, butonul STOP și indicator luminos pentru starea bateriei și durata de funcționare.



COLOANE

Unitățile electrice de ridicare pe două coloane permit reglarea înălțimii platformei saltelei și a celorlalte poziții. Construcția patului pe coloane asigură stabilitatea perfectă a patului.

8 TASTE DE CONTROL ÎN PANOURILE LATERALE

Tastele de control din panourile laterale sporesc încrederea pacientului.

9 A 5-a ROATĂ

A 5-a roată ușurează manevrarea patului în colțuri mai ales în spațiile înguste.

10 EXTENSIA PATULUI

Extensia integrată a patului reglează lungimea platformei pentru saltea în funcție de înălțimea pacientului.

11 RAFTUL PENTRU LENJERIE

Raftul pentru lenjerie permite și depozitarea panoului de supraveghere.

12 ÎNCHIZĂTORI

Închizătorile de la capetele patului împiedică scoaterea accidentală a tăbliilor de la capetele patului atunci când dirijați sau manevrați patul în alt mod.

13 PEDALĂ DE CONTROL

Pedalele de control sunt protejate de o barieră mecanică, pentru a nu le activa în mod accidental.



PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni externe	
223×104,5 cm (panourile laterale ridicate)	
223×102,5 cm (panourile laterale coborâte)	
Extensia/reducerea lungimii patului	+8/+17 cm
Dimensiuni saltea	208 × 86 × 14 cm Max.
Înălțime saltea	23 cm
Reglarea înălțimii	39,5 – 77,5 cm
Înclinare TR/ATR	±16°
Panouri laterale rabatabile cu înălțime deasupra platformei saltelei (fără saltea)	45 cm
Greutate (echipament de bază)	138 kg
Sarcină maximă suportată	230 kg

PARAMETRI ELECTRICI

Alimentare electrică 230 V, ±10 %, 50–60 Hz	
Intrare max.	max. 1,6 A, 370 VA
Protecție împotriva apei și prafului	IP 54
Tip de protecție împotriva curentului electric	Clasa I
Nivel de protecție împotriva accidentelor cauzate de curentul electric	parte tip B
Mod de operare al electromotorului (factor încărcare)	10%, max. 2 min / 18 min

CERTIFICATE

- Compania LINET este certificată conform standardelor europene și sistemului de calitate: EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.
- Produsele sunt fabricate conform standardelor europene privind tehnologia medicală și paturile de uz spitalicesc: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-38, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC.

Sistem de control

Dispozitivele de control le permit asistentelor să manevreze în mod eficient și ergonomic patul Eleganza 3XC. Pacientul poate controla unele funcții ale acestuia care contribuie la sporirea independenței lor și a confortului fizic. Toate dispozitivele de control sunt prevăzute cu un mecanism de blocare standard pentru siguranță, împotriva pornirii accidentale.



TASTE DE CONTROL



BUTONUL GO

Butonul de siguranță GO îl protejează pe pacient de eventualele răni cauzate de mișcarea accidentală a patului. Butonul GO activează tastele de control ale patului timp de 3 minute. În acest interval, tastele sunt inactice, iar patul nu poate fi activat în mod accidental.

TELECOMANDĂ

Telecomanda practică pentru pacient și asistente are taste pentru pozițiile de bază ale patului inclusiv înclinarea spătarului și reglarea înălțimii platformei saltelei.



PANOU DE SUPRAVEGHERE

Panoul de supraveghere are o formă ergonomică, iar design-ul grafic este ușor de folosit. De la acest panou pot fi acționate mai multe funcții, în memorie fiind stocate 5 poziții—CPR, Trendelenburg, scaun pentru cardiaci, poziția de mobilizare, poziția de examinare.



PANOU DE CONTROL ÎN PANoul LATERAL

Panoul de control este încorporat în panoul lateral pentru a fi accesibil pacientului, permițând reglarea patului în poziția de bază.



PEDALE DE CONTROL

Pedalele de control se află sub cadrul patului pe ambele părți ale acestuia și permit reglarea practică și ușoară a înălțimii și a poziției de examinare. Ele sunt prevăzute cu un dispozitiv mecanic de protecție împotriva activării accidentale.

PALETĂ DE CULORI

Design-ul patului Eleganza 3XC respectă cele mai noi tendințe estetice pentru domeniul medical. Culoarea tăbliilor de la capetele patului sunt variabile pentru a se asorta cu încăperile în care vor fi duse paturile.

GAMA DE CULORI

1. albastru deschis
2. portocaliu nectarină
3. verde kiwi
4. roz grapefruit
5. albastru marin
6. alb
7. alb perlat
8. gri



PANOURI DIN LEMN

Chiar dacă patul Eleganza 3XC este de uz spitalicesc și este disponibil într-o gamă largă de culori moderne, este disponibil și în versiuni cu decor din lemn.

Acest design evocă un sentiment plăcut, ajutându-i pe pacienți să se simtă ca acasă și are un efect calmant mai ales asupra pacienților vârstnici care se simt mai bine într-un mediu tradițional.

DECOR DIN LEMN

- A. arțar alb B. fag natural
C. ambră D. mocca


Paturile Eleganza 3XC pot fi livrate cu o gamă largă de accesorii. Accesoriile corespunzătoare sporesc utilitatea patului și respectă pe deplin cerințele și necesitățile unui departament specific. Ele îi ajută pe pacienți să dobândească mai multă încredere în ei înșiși și ușurează munca personalului medical.



Braț de ridicare cu mâner




Măsuță de scris din plastic

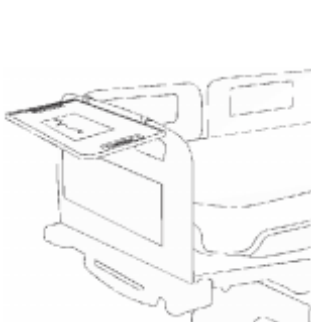

Diverse accesorii

Mâner din plastic pentru brațul de ridicare

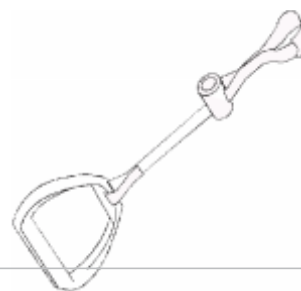

Suport pungă urinară cu înclinare reglabilă



ELEGANZA 3XC



Želevčice 5, 274 01 Slaný, Czech Republic

tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.com, www.linet.com

Reprezentant în România:



TEHNOPLUS[®]
MEDICAL

Str. Odobesti, nr. 1, sector 3, București

Tel.: +4021.348.52.72, 4021.348.52.82

Fax: +4021.348.53.43

Mobil: +4037.273.31.54

<http://www.tehnoplus.ro>

e-mail: tehnoplus@tehnoplus.ro